

## 防護服の着脱方法

## 1 防護服の装着方法

## 1 手袋、ソックスの着用

インナー手袋(ラテックス製)をはめます。

袖口から覆うように装着します。

ソックスはズボンの上に被せてはきます。



## 2 防護服の着用

両足、両腕を通し、ファスナーを首の下あたりまで閉めます。



## 3 シューズカバーの着用

靴を履き、シューズカバーを装着します。

シューズカバーはタイベック・ソフトウェアの裾を覆い、紐で結びます。



## 4 マスク、ゴーグルの装着

必ずフィットテストを行ない、隙間のないように装着します。

ゴーグルは事前にゴムバンドを調節してからかけます。



## 5 防護服のフードを被る

フードをかけるときに、髪の毛が出ないように深く被ります。

あごの下までファスナーをしっかりと上げます。

ファスナーを密閉するようにファスナーカバーを口元部分まで貼り付けます。



## 6 アウター手袋の装着

タイベック・ソフトウェアの袖の上にくるように深くはめます。



## 2 防護服の脱衣方法

### 1 事前準備

シューズカバー、アウター手袋の消毒を行い、シューズカバーのひもを解きます。




### 2 アウター手袋を外す

片方の手袋を裏返ししながら外します。

裏返った手袋で、もう一方の手袋をつかみ、同様に裏返ししながら外します。

手袋を外す際に「パチン」と音を立てないように静かに外します。

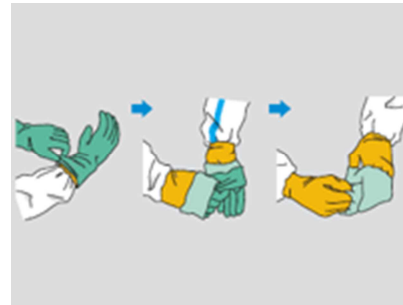

### 3 防護服を脱ぐ①

3-1. 前ファスナーを一番下まで下ろし、皮膚や毛髪に触れないようフードを外します。



3-2. 介助者の手を借り、肩から脱ぎます。



3-3. 手を袖の中に入れ、後手に片方の手を脱ぎます。



3-4. 両手を脱ぎます。



<悪い例>

腕を交差させるとインナーにウイルスが付着する可能性があります。



#### 4 防護服を脱ぐ②

表を内側に丸め込むように脱ぎ、シューズカバーも一緒に外します。

インナー手袋はまだ外さないようにします。



#### 5 ゴーグルを外す

衣服に外側の面が触れないように、注意してゆっくり外します。



#### 6 マスクを外す

マスクの表側に手を触れないように頭ひもをつかんで外します。



#### 7 インナー手袋を外す

表面を消毒した後、アウター手袋同様の方法で裏返しながら手袋を外します。

